


Manual de funcionamiento para usuarios del Negatoscopio Virtual

Puedes llegar a la **página de inicio** entrando desde la tecla correspondiente en nuestra página web dbortega.es o bien mediante el enlace “Negatoscopio Virtual.com”

Página de inicio

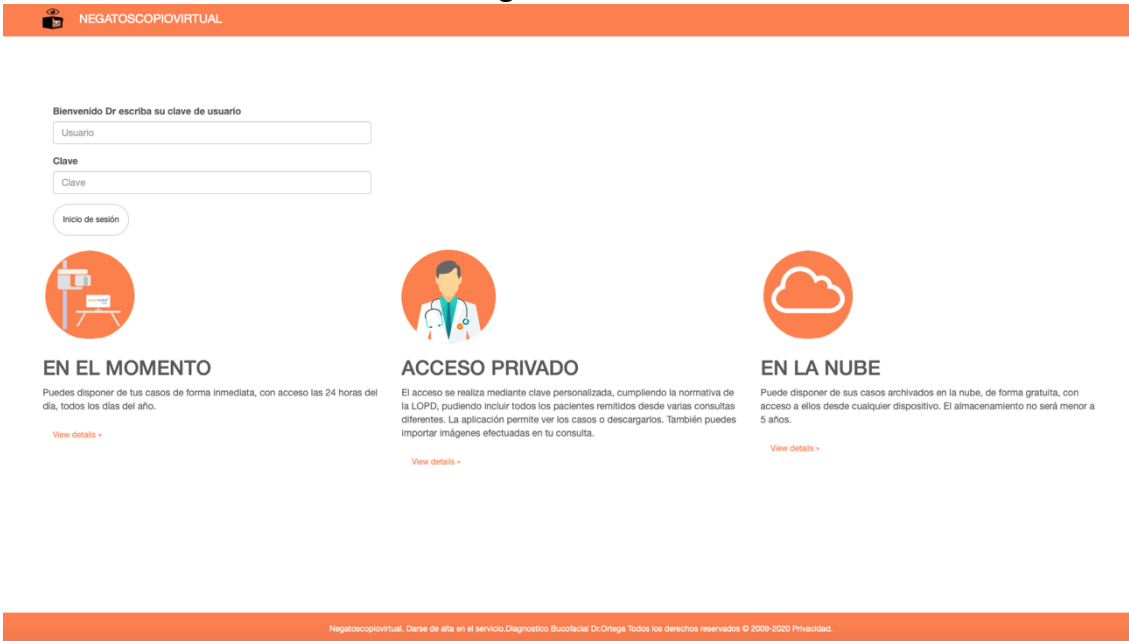


NegatoscopioVirtual. Darse de alta en el servicio Diagnostico Bucofacial Dr.Ortega Todos los derechos reservados © 2009-2020 Privacidad.

En la pagina de inicio deberás introducir “el Usuario y la Contraseña” proporcionadas por nosotros. Puedes solicitarlo mediante nuestra página web (dbortega.es) o mandando un email a info@dbortega.es

La conexión es cifrada proporcionando toda la seguridad necesaria para el tratamiento de datos de tus pacientes.

Página principal

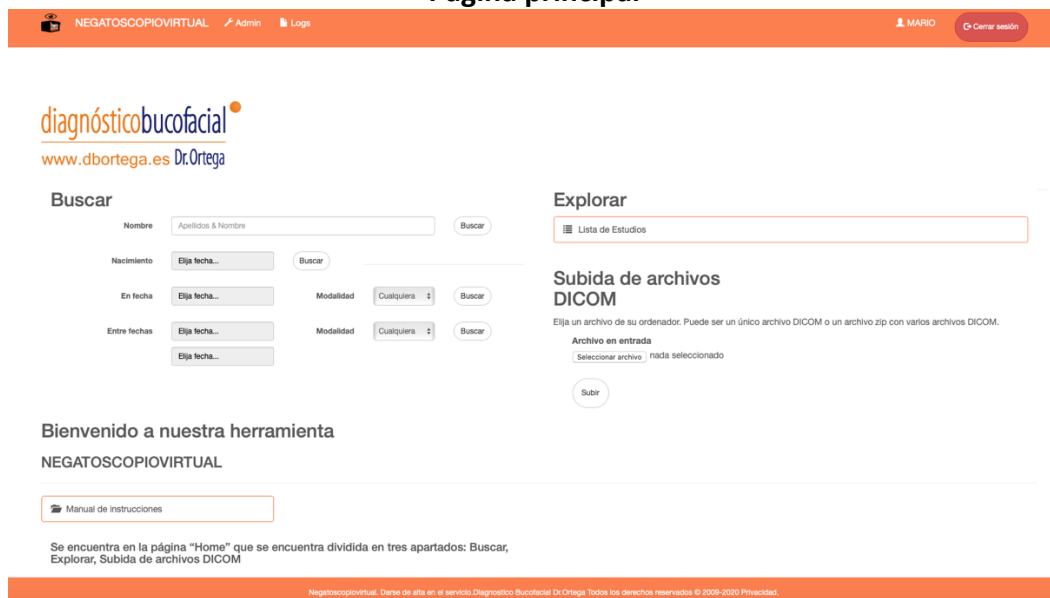

NegatoscopioVirtual. Darse de alta en el servicio Diagnostico Bucofacial Dr.Ortega Todos los derechos reservados © 2009-2020 Privacidad.

La **página principal** dispone de tres herramientas:

- 1 . BUSQUEDA
- 2 . LISTA DE PACIENTES
- 3 . SUBIDA ARCHIVOS DICOM

1. Búsqueda

Buscar

Nombre	<input type="text" value="Apellidos & Nombre"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
Nacimiento	<input type="text" value="Elija fecha..."/>	<input type="button" value="Buscar"/>
En fecha	<input type="text" value="Elija fecha..."/>	Modalidad <input type="text" value="Cualquiera"/> <input type="button" value="Buscar"/>
Entre fechas	<input type="text" value="Elija fecha..."/> <input type="text" value="Elija fecha..."/>	Modalidad <input type="text" value="Cualquiera"/> <input type="button" value="Buscar"/>

En el apartado de búsqueda tendrás la posibilidad de encontrar las pruebas de tus pacientes ya almacenados en Negatoscopio Virtual.

Puedes buscar por apellidos y nombre del paciente, por fecha de nacimiento, por fecha o entre dos fechas diferentes. Al hacer la búsqueda por fechas podrás filtrar además, si es de tu interés, por modalidad.

Las modalidades pueden ser:

Capturas: imágenes generadas de los estudios de escáner y montajes fotográficos.

Escáner: TAC-CBCT. Imágenes axiales completas del caso.

DX, PX, CR: imágenes radiológicas convencionales: ortopantomografía, telerradiografía, radiografía de carpo, etc.

Para abrir un paciente simplemente debes pulsar sobre él.

2. Lista de estudios

NEGATOSCOPIOVIRTUAL

Home / Lista de Estudios

Lista de Estudios

1-200 de 349.381

Clasificar según Nombre Fecha

	G (8/12/78) - 1835679 Secondarycapturetac - 202009026362833 OT - 1 series - 3 imágenes	2/9/20 12:55
	I (19/2/61) - 1835682 Unnamed - 202009026362840 PX - 1 series - 1 imagen	2/9/20 12:50
	B (26/3/63) - 1835674 Unnamed - 202009026362822 PX - 1 series - 1 imagen	2/9/20 12:49
	Q (10/1/04) - 1835681 Unnamed - 202009026362838 DX - 1 series - 1 imagen	2/9/20 12:49
	L (3/6/03) - 1351068 Estudio Fotografico - 202009026362829 OT - 1 series - 1 imagen	2/9/20 12:45
	P (4/9/06) - 1664203 Unnamed - 202009026362825 PX - 1 series - 1 imagen	2/9/20 12:45

negatoscopiovirtual. Círese de alta en el servicio Diagnóstico Bucodental Di.Ortega Todos los derechos reservados © 2009-2020 Privacidad.

Al pulsar sobre la lista de estudios de la barra superior accederás a todas las pruebas de tus pacientes con la posibilidad de ordenarlos por fecha o nombre del paciente.

Para abrir un paciente simplemente debes pulsar sobre él.

3. Subida de archivos Dicom

Subida de archivos DICOM

Elija un archivo de su ordenador. Puede ser un único archivo DICOM o un archivo zip con varios archivos DICOM.

Archivo en entrada

Seleccionar archivo nada seleccionado



La aplicación permite la posibilidad de importar al sistema los archivos DICOM de un caso, puede ser un único archivo DICOM o un archivo zip con varios archivos DICOM, sin límite de espacio y con total seguridad. Nuestras pruebas y las que tú quieras almacenar se guardarán un tiempo mínimo de 5 años.

Para importar a la aplicación tendrás que pinchar en el recuadro “Seleccionar archivo” y pinchar después sobre la tecla “subir”. El programa mostrará una barra de progreso y al finalizar nos avisara de que el proceso se ha completado.

El archivo siempre debe ser en formato Dicom.
La velocidad de subida dependerá de la conexión del usuario.

Subida de archivos DICOM

Elija un archivo de su ordenador. Puede ser un único archivo DICOM o un archivo zip con varios archivos DICOM.

Archivo en entrada

Seleccionar archivo 60000.zip

Name: 60000.zip

Size: 129.45MB

Type: application/zip



Upload completed

Exploraciones de Paciente

Una vez seleccionado un paciente, ya sea desde la página principal o desde el listado de pacientes se abrirá la página “exploraciones de paciente”, herramienta principal de nuestro portal. Permite:

- Ver las exploraciones en el momento desde cualquier equipo PC, Mac, Móvil o Tablet.
- Abrir un visualizador Dicom en el que pueden efectuarse mediciones en tamaño real 1.1.
- Enlazar con el visor Osirix de Mac (requiere el uso de un ordenador Mac y tener Osirix previamente instalado).
- Descargar las pruebas en formato Dicom.
- Crear anotaciones.
- Hacer informes
- Subir documentos dentro del estudio en distintos formatos.

Y también tendrás la posibilidad de proporcionar al paciente un “direct ticket”, para que pueda visualizar sus pruebas en cualquier momento.


NEGATOSCOPIOVIRTUAL


Home / Lista de Estudio / A - Mi Y Ms - 2/9/20 17:32

A 829745

Nombre A
ID paciente 1829745
Nacimiento 22/8/63
Edad Actual 57 y
La edad al Estudio 57 y

2 estudios

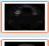2/9/20 17:32  Mi Y Ms - 202009026362991
CT - 2 series - 337 imágenes

26/5/20 12:03  MI - 202005266348751
CT - 3 series - 318 imágenes

1 Mi Y Ms - 2/9/20 17:32

Fecha estudio 2/9/20 17:32
Descripción Mi Y Ms
Número acceso 202009026362991
Médico remitente
Modalidad CT
Comentario Guardar
Estado del estudio
Informe

2 Serie

1 - unnamed
335 imágenes

1 - Localizers
2 imágenes

Descargar Estudio

🖨️ Abrir en Visor Mac esta acción requiere tener instalado Quartz

📦 Descargar como zip, genera un archivo comprimido que contiene las imágenes dicom

👁️ Abrir en visualizador web, esta acción abrirá un visor en el que podrá entre otras cosas hacer mediciones 1.1

Acceso directo pacientes

Acceso directo a este estudio disponible con las siguientes credenciales:

Usuario
Clave

Utiliza este método para compartir este estudio con el paciente.

Subir documento

Subir documento para este estudio (PDF, JPEG, PNG, TIFF, Pages, Word, RTF, txt, etc.)

Elija un archivo de su ordenador.

nada seleccionado

Negatoscopiovirtual. Darse de alta en el servicio. Diagnóstico Bucofacial Dr. Ortega Todos los derechos reservados © 2009-2020 Privacidad.

Ahora veremos paso a paso el manejo de esta página.
La página dispone de tres rectángulos naranjas bien diferenciados.

Si observamos el rectángulo superior (lo denominaremos Estudios) en el se observan en el lado izquierdo datos de filiación del paciente y en el izquierdo otro rectángulo más pequeño en el que se encuentran todas las exploraciones (estudios) que tiene este paciente diferenciadas por fecha.


NEGATOSCOPIOVIRTUAL


Home / Lista de Estudio / A - Mi Y Ms - 2/9/20 17:32

A 829745

Nombre A
ID paciente 1829745
Nacimiento 22/8/63
Edad Actual 57 y
La edad al Estudio 57 y

2 estudios

2/9/20 17:32  Mi Y Ms - 202009026362991
CT - 2 series - 337 imágenes

26/5/20 12:03  MI - 202005266348751
CT - 3 series - 318 imágenes

En la parte derecha del rectángulo naranja pequeño se observan tres botones (que también aparecerán en el siguiente apartado):




- El botón verde enlaza directamente con el Visor Osirix de Mac (solo aparece si se usa un Mac, un Iphone o un Ipad; en el resto de ordenadores Windows Linux o dispositivos Android esta desactivado por defecto).
- El botón que tiene una flecha hacia abajo permite descargar los ficheros en formato Dicom. Esta herramienta es fundamental ya que estos archivos son los que se necesitan para importarlos en la mayoría de los visores y programas de planificación del mercado así como para enviar a los laboratorios para diferentes cometidos.
- El botón con la representación de un ojo abre directamente un visor incluido en la plataforma. No requiere ningún tipo de instalación y puede utilizarse con PC, Mac, Linux o Android (más adelante explicaremos su funcionamiento).

El recuadro naranja central (lo denominaremos serie) en el lado izquierdo señala datos de filiación y en el derecho representa las diferentes modalidades o series que tiene cada una de las exploraciones (estudios) señaladas en el apartado anterior (estudios).

The screenshot shows a medical software interface. On the left, there is a sidebar with study details: 'Fecha estudio' (2/9/20 17:32), 'Descripción' (Mi Y Ms), 'Número acceso' (202009026362991), 'Médico remitante', 'Modalidad' (CT), and 'Comentario' (with a 'Guardar' button). Below this is 'Estado del estudio' with 'Editar -' and 'Informe' (with a 'Crear informe' button). A 'Descargar Estudio' section contains three options: 'Abrir en Visor Mac' (highlighted in green), 'Descargar como zip', and 'Abrir en visualizador web'. On the right, under '2 Serie', there are two series: '1 - unnamed' (335 imágenes) and '1 - Localizers' (2 imágenes). Each series has a thumbnail, a green percentage button, a download icon, and an eye icon.

Dependiendo del tipo de exploración/estudio este puede contener una o varias series. Podemos elegir que serie queremos descargar, abrir con el visor, crear informe o añadir comentario.


INFORMES

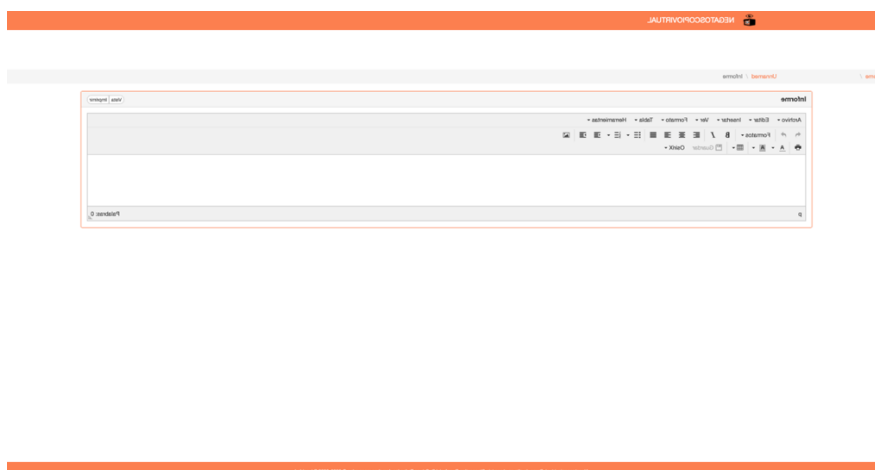

Al pulsar el botón crear informe que tenemos en el apartado series nos abrirá este editor de texto en el que podemos crear un informe del paciente, si disponemos de uno creado por nosotros también podemos subirlo a la nube siempre que tenga los siguientes formatos PDF, JPEG, PNG, TIFF, Pages, Word, RTF, txt, etc, mas adelante explicaremos como subir estos documentos.




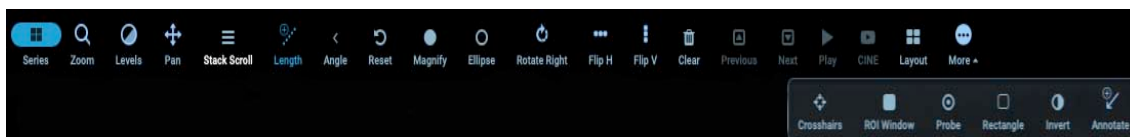
Al pulsar directamente sobre la imagen entraremos en una pantalla en la que se puede tener una visión rápida del estudio.

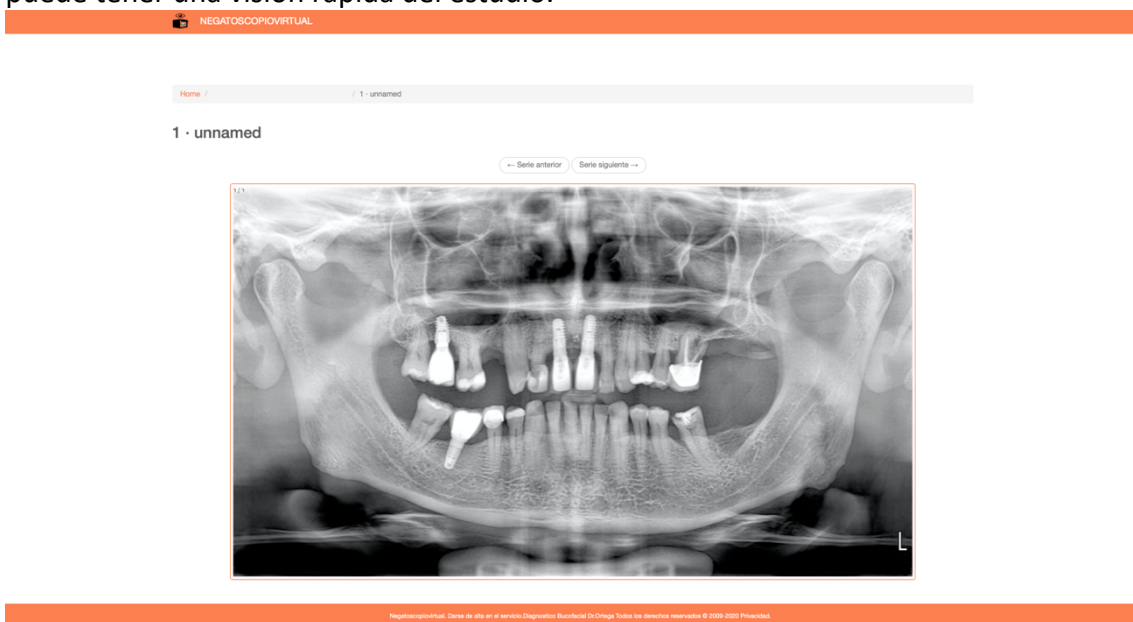

Una vez abierta esta imagen podemos copiarla en formato JPG simplemente pulsando sobre ella con el botón derecho de nuestro ratón y guardándola como imagen en nuestro equipo.

Los botones del lado derecho funcionan de la misma manera que en el apartado estudio. Los recuadros que aparecen a la izquierda con los mismos símbolos que los botones realizan las mismas acciones.

Al pulsar el botón que tiene un ojo  se nos abrirá este visor web que nos dará la posibilidad de hacer mediciones 1.1, ajustar niveles, medir áreas, medir ángulos, invertir la imagen y demás opciones.





Las ventajas de este visor incluyen su rapidez de uso, ser muy intuitivo y la precisión de las medidas realizadas. Puede ser una opción para trabajar cuando no se dispone de un visor específico. Es compatible con cualquier tipo de ordenador, móvil o tablet.

SUBIR ARCHIVOS

Subir documento

Subir documento para este estudio (PDF, JPEG, PNG, TIFF, Pages, Word, RTF, txt, etc.).

Elija un archivo de su ordenador.

nada seleccionado

Cuando dispongamos de cualquier archivo en los formatos que se indican en la imagen podemos seleccionarlos desde nuestro ordenador y dejarlos almacenados en la carpeta del paciente. Una vez seleccionado el archivo y activada la herramienta “subir” tendremos que esperar a que la barra de proceso indique que la subida esta completada.

Upload completed


DIRECT TICKET

· 1726327


Nombre	A
ID paciente	1726327
Nacimiento	18/9/97
Edad Actual	22 y
La edad al Estudio	22 y

2 estudios

27/8/20 10:58
1

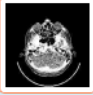

18/6/20 13:28
2

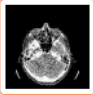

Esta opción permite compartir el estudio con el paciente o con otro profesional al que queramos pedir una segunda opinión sobre el caso. Para ello tendremos que facilitar el enlace a Negatoscopio Virtual <https://www.negatoscopiovirtual.com/>-
El usuario y las claves corresponden a la ID de paciente que genera nuestro centro y la fecha de nacimiento del paciente en formato D/M/A. En el portal que abrirá el paciente solo dispondrá acceso a su prueba.